

Q : 「たすけ」の構造と各パーツの機能は？ A : はい、構造と各パーツの機能は下図の通りです。

新発想/猫背 & 腰痛改善ベルト「たすけ」各パーツの機能



①：骨盤ベルト

- ✓ 骨盤の安定
- ✓ 腹圧アップ
- ✓ 矯正の起点

②：たすきバンド

- ✓ 胸郭を開く
- ✓ 肘を引く
- ✓ 矯正の原動力

③：背骨パッド

- ✓ 背骨を直立
- ✓ 直立の維持
- ✓ 猫背を防止

④：丹田パッド

- ✓ ベルトずれ防止
- ✓ 丹田意識の持続
- ✓ 装着位置の目安

メーカー小売り希望価格：12,000 (税込み) 送料 800 円 只今/リリース記念価格 9,800 円 (税込み)

Q : 「たすけ」のお手入れは？ 以下を順守して長くご愛顧下さい。無料修理の保証期間は半年です！

A : はい、中性洗剤で押し洗い直射日光は避けて陰干し、ドラム乾燥並びにアイロンは厳禁です

Q : 着脱の手順は？ A : 慣れると 3~5 秒肩の動きの硬い方でも無理なく装着出来ます



(1)：準備 (タグ前)



(2)：タグを摘んで外す



(3)：後ろに回す



(4)：パッド/ヘソの真下



(4)：きつく締める

●尻の下まで下ろす



(5)：後ろ/バンド掴み



(6)：両手を差して



(6)：腕に引き上げ完了



(7)：外したら



(8)：タグ上で接着

Q : 「たすけバンド」場面別.掛け方の目安は？

ゴルフなどのスイング中には肩に掛けても大丈夫です



● 歩く時 (肘上)



● 手仕事中 (肩口)

メーカー/山屋産業株式会社

☎076-289-6996 <https://yamaya-sangyo.co.jp>

〒929-0327 石川県河北郡津幡町庄木 63 番地 1

開発元/新福祉技術研究所

〒112-0011

東京都文京区千石 3-32-8

電話 03-3944-8870

H P : korobander.com



サイトで詳しい活用法などを動画も駆使して解説しております。